

## **Инструкция по настройке пульта медсестры iBells 8800**

### **Настройка календаря**

- 1) В режиме ожидания, нажмите клавишу [FUN], пока цифры не начнут мигать.
- 2) Нажмите клавишу [MOVE], чтобы выбрать дату.
- 3) Нажмите клавишу [UP] или [DOWN], чтобы выбрать нужную дату.
- 4) Для завершения настройки нажмите кнопку [FUN] в режиме ожидания.

### **Регистрация вызывающих устройств**

- 1) в режиме ожидания, нажмите клавишу [FUN] и удерживайте 3 секунды пока [F1] не появится на экране.
- 2) Нажмите клавишу [ENT], [001 ---] появляется (первый номер), нажмите клавишу [UP], [DOWN], чтобы выбрать другой номер (доступно 300 вариантов номеров в одном регистре).  
Следующие номера должны быть зарегистрированы в виде [002 ---] после регистрации [001 ---] и так далее.
- 3) Нажмите [ENT] снова, и появится [001-01]. Нажмите клавишу [UP], [[MOVE]] или [DOWN], чтобы выбрать регистрационный номер.
- 4) Нажмите кнопку вызова, чтобы зарегистрироваться, номер мигает на экране, зазвучит мелодия
- 5) Нажмите кнопку [ESC], чтобы на дисплее появилась [F1].
- 6) Далее нажмите клавишу [ESC], чтобы снова вернуться в режим ожидания.  
Регистрация закончена.
- 7) Повторите шаг 2) ~ шаг 4), чтобы зарегистрировать все кнопки вызова, а затем нажмите клавишу [ESC] дважды в режиме ожидания. Регистрация всех кнопок завершена.